



Instruções de uso:

1. Nos 10 minutos antes de coletar a amostra de saliva, não coma, não beba, não fume nem mastigue chicletes.
2. Acumule (junte) saliva na boca.
3. **FIGURA 1** - Abra o Frasco de Amostra, contendo a Solução de Lavagem Estabilizadora, coloque o frasco e a tampa em uma superfície plana.
4. **FIGURA 2** – Pegue o dispositivo DNA • SAL™ e coloque-o na boca com os coletores dentados perpendiculares ao interior da bochecha, na parte INFERIOR, próximo à linha da gengiva.

5. **FIGURA 3** - Coloque um dedo DO LADO DE FORA da bochecha, para agir como resistência. Esfregue o dispositivo coletor, para frente e para trás, no interior da bochecha por, no mínimo, **30 segundos**, para coletar uma mistura de saliva e material celular. **NOTA:** O coletor dentado não precisa estar encharcado, uma vez que as células adicionais ficarão na saliva da boca e serão coletadas na lavagem.

6. Remova o dispositivo da boca e segure-o na mão.

7. Usando a outra mão, despeje na boca o conteúdo do Frasco de Amostra (2 mL da solução de lavagem estabilizadora) e faça um bochecho por 10-15 segundos.

NÃO ENGULA A SOLUÇÃO.

8. Expectore ("cuspa") o máximo possível da Solução de Lavagem Estabilizadora de volta ao Frasco de Amostra. Essa Solução agora estará enriquecida de saliva e de células epiteliais contendo o DNA.

9. **FIGURA 4** - Segure firmemente o Frasco de Amostra com uma das mãos e com a outra insira o coletor do dispositivo DNA • SAL™ dentro do Frasco. Dobre-o para trás até quebra-lo dentro do Frasco de Amostra.

10. **FIGURA 5** - Descarte o cabo do dispositivo e rosqueie a tampa do Frasco firmemente para evitar vazamento da amostra.

11. Agite vigorosamente o Frasco de Amostra (contendo a mistura de Solução de Lavagem Estabilizadora e células) por 15 segundos a fim de homogeneizar a Solução e a amostra.

12. **FIGURA 6** - A amostra agora está pronta para processamento imediato ou para o transporte até o laboratório, onde a extração da amostra poderá ser realizada.

13. Em alguns kits um "Envelope de Retorno" é fornecido para fins de transporte da amostra. Se o envelope for fornecido, por favor use-o para enviar a amostra coletada para o remetente adequado.



15720 NE 31st Avenue
Vancouver, WA 98686 USA
Tel: 360.546.1563
Fax: 360.546.1581
Email: Info@4saliva.com

www.4saliva.com